



Caratteristiche Tecniche

Certificato CE
Alimentazione: 24V
Alimentazione esterna:
100/240V - 50/60Hz
Potenza assorbita: 40VA
Protezione dell'apparecchio:
n. 1 fusibile R. 250mA
Peso netto: 6Kg
Dimensioni: 550x260x230mm



M & T srl
medical & technology

TECHNOLOGICAL SYSTEMS
FOR THE MEDICINE AND THE AESTHETIC



Norma UNI EN ISO 13485:2016


Sede legale
Via Della Fiera, 87
47923 RIMINI

Sede produttiva
Via Pietrarubbia, 32F
47922 RIMINI
Tel. +39.0541.727486
Fax +39.0541.765305

Ufficio Commerciale
Via degli Olmetti, 18
00060 Formello (zona ind.) ROMA

www.medical-technology.it - www.eporex.net
info@medical-technology.it

P3AEPOREX_02

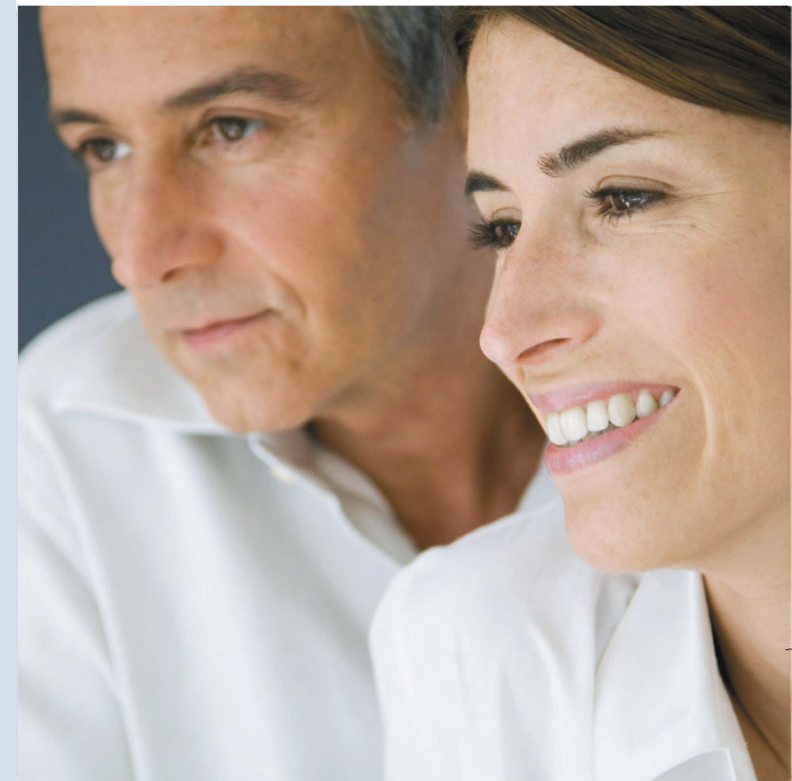


eporex
mesoterapia senza aghi

eporex

mesoterapia senza aghi

La Mesoterapia con Eporex K69 sta aiutando in tutto il mondo donne e uomini a cambiare l'approccio con la mesoterapia classica. Eporex K69–Mesoterapia senza aghi e' una combinazione unica di estetica avanzata e tecnologia di ultima generazione.

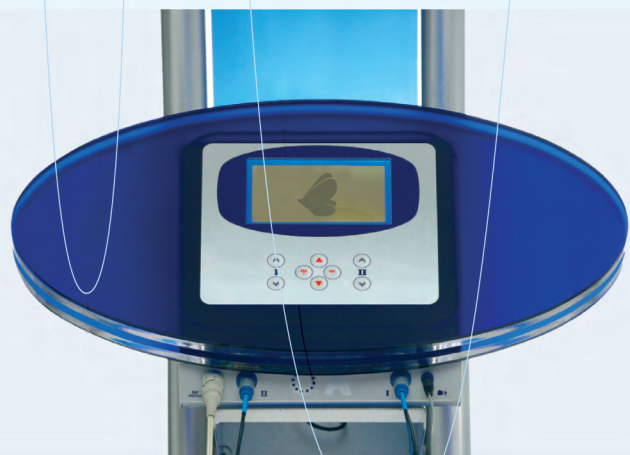

Applicazioni

Riduzione adipi
Cellulite
Smagliature
Rassodamento seno
Tonificazione tessuti
Acne
Ringiovanimento viso
Tonificazione viso
Mesolift viso
Alopecia

Trattamenti

I programmi di trattamento con Eporex sono stati sviluppati attraverso ricerche cliniche intensive e applicazioni pratiche da numerosi utilizzatori a partire dall'anno 2000. Con il sistema Eporex è possibile

trattare con successo un'ampia fascia di condizioni estetiche di viso e corpo e raggiunge la soddisfazione del cliente fornendo trattamenti senza dolore e con risultati duraturi.

Dotazioni supplementari: gli Ultrasuoni

Il sistema Eporex include anche sei trattamenti con spatola ultrasuoni, che permettono una esfoliazione, pulizia e tonificazione cutanea. Sono usati all'inizio per la

preparazione della pelle prima della veicolazione di principi mesoterapici, gli ultrasuoni lavorano ad una frequenza di 25.000 hertz.

Che cosa e' la Mesoterapia ?

Ideata da un medico francese intorno al 1950, secondo la teoria mesoterapica alcune condizioni possono essere trattate meglio iniettando piccole quantità di medicinale direttamente nell'area da trattare. Oggi la mesoterapia è medicina convenzionale in tutto il mondo ed è usata nel trattamento di un centinaio di condizioni mediche ed è anche usata largamente nel campo estetico, per il

ringiovanimento della pelle e per accelerare lo scioglimento dell'adipe. Le formulazioni usate includono amminoacidi, vitamine, minerali e fattori di crescita, ognuno con azioni differenti che hanno effetti sui processi e sugli sviluppi cellulari. Eporex realizza trattamenti mesoterapici senza aghi, senza dolore nè lividi, confortevoli per il paziente.

Come lavora?

Il sistema Eporex rappresenta un significativo progresso delle tecniche di ionoforesi e iontoforesi e ha superato le precedenti limitazioni con l'applicazione di specifiche forme d'onda in grado di incrementare la penetrazione cutanea.

L'Eporex impiega una corrente galvanica a basso livello di energia con onde elasto-modulate. Questa crea ioni, cioè molecole di sostanze attive, caricate elettricamente. Il manipolo di Eporex è caricato

anch'esso elettricamente e muovendosi lungo la pelle, spinge gli ioni in profondità, senza danneggiare il tessuto cutaneo. Gli ingredienti attivi penetrano grazie al momentaneo cambiamento nei lipidi cutanei che si è creato attraverso l'impulso elettrico; gli ingredienti attivi quindi penetrano attraverso la pelle per raggiungere le cellule bersaglio. Le cellule scambiano gli ingredienti ionizzati attraverso canali conosciuti come acquaporine.

